


SURGICAL TECHNIQUE BROCHURE

Reparación meniscal *inside-out* con
CordFit Meniscal Repair y **Camisas** Meniscales

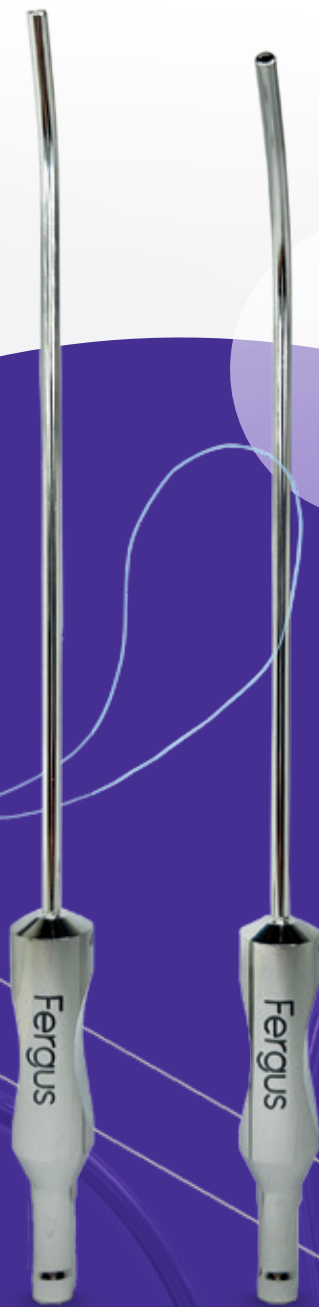

Fergus

CordFit Meniscal Repair

Posee una **sutura tipo cuerda #2-0 con dos agujas rectas** para reparaciones meniscales mediante técnica *inside-out*, accediendo principalmente al cuerno anterior y al cuerpo del menisco.


- Disponible en color azul

◉ FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA

Sus dos agujas rectas de 320 mm de largo y 0,73 mm de diámetro, fabricadas en acero inoxidable otorgan máxima flexibilidad. Además, cuenta con un grafado de alta resistencia, que soporta cargas de más de 20 N.¹

◉ PASAJE SUTIL

Las agujas con punta diamante son ideales para perforar el menisco sin desgarrarlo. A su vez, su cubierta siliconada permite un pasaje suave a través del tejido.

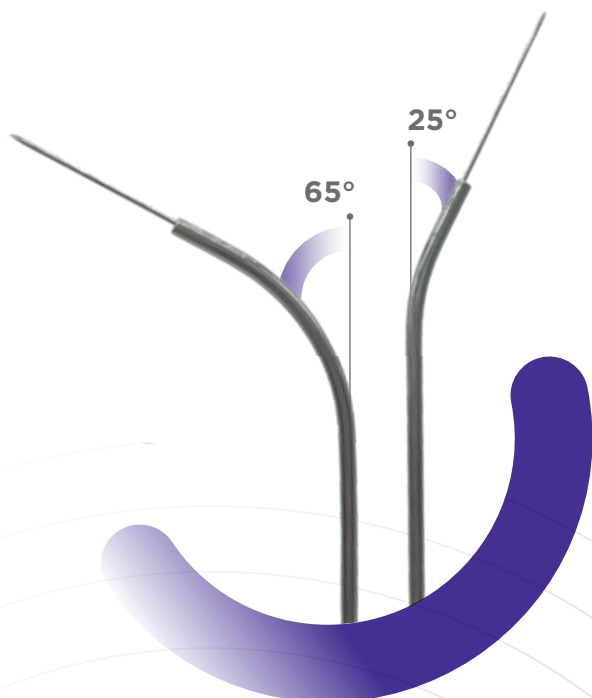

◉ INSTRUMENTAL ASOCIADO

Estas agujas se utilizan en conjunto con camisas de diferentes angulaciones, 25° y 65°, que permiten direccionar su pasaje a las zonas a reparar.

Las camisas meniscales cuentan con punta roma, que evitan daños en el menisco durante el procedimiento.

1. Definido por ensayos internos según US Pharmacopeia

REPARACIÓN MENISCAL INSIDE-OUT

Step by step

01



A través de una incisión, inserte la camisa meniscal en la zona de la lesión.

NOTA: Se recomienda seleccionar la angulación de la camisa meniscal según la zona de lesión del menisco (ver página 1).

Utilizando la camisa meniscal, inserte en ella la aguja **CordFit Meniscal Repair** y acceda a la zona del menisco a reparar. Procure introducir la aguja a una profundidad que no comprometa el tejido sano.

IMPORTANTE: Posicione el protector poplíteo en la región posterior de la cápsula articular para proteger las estructuras neurovasculares durante el procedimiento.

02



03



A

Tras atravesar el menisco, retire la aguja fuera de la articulación (**A**).



B

Mantenga la sutura en el lugar para facilitar el paso de la siguiente aguja (**B**).

04


A



B



C

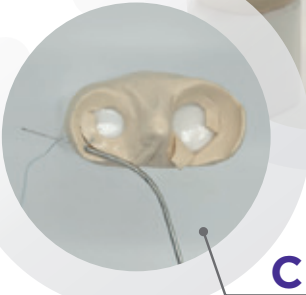

Posicione la camisa meniscal de manera adyacente a la primera sutura para crear una reparación vertical, horizontal u oblicua **(A)** y proceda a ingresar la segunda aguja **(B)**.

Después de extraer la segunda aguja, tire de la sutura para acercar los bordes del desgarro meniscal **(C)**.

Este proceso se repite para cada punto de sutura necesario.

NOTA: Se recomienda identificar y separar las suturas de cada punto para luego anudarlas.

Fije la sutura mediante un nudo y aproxímelo a la cara lateral de la cápsula con el empuja nudos de Fergus **(A)**.

A

05



B



Luego, corte la sutura restante con la pinza corta suturas de Fergus **(B)**.


06



Con el gancho palpador de Fergus asegure que la reparación es estable y que los bordes del menisco están correctamente alineados.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Código	Descripción
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, con dos agujas
FG-IN590025	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 25°
FG-IN590065	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 65°

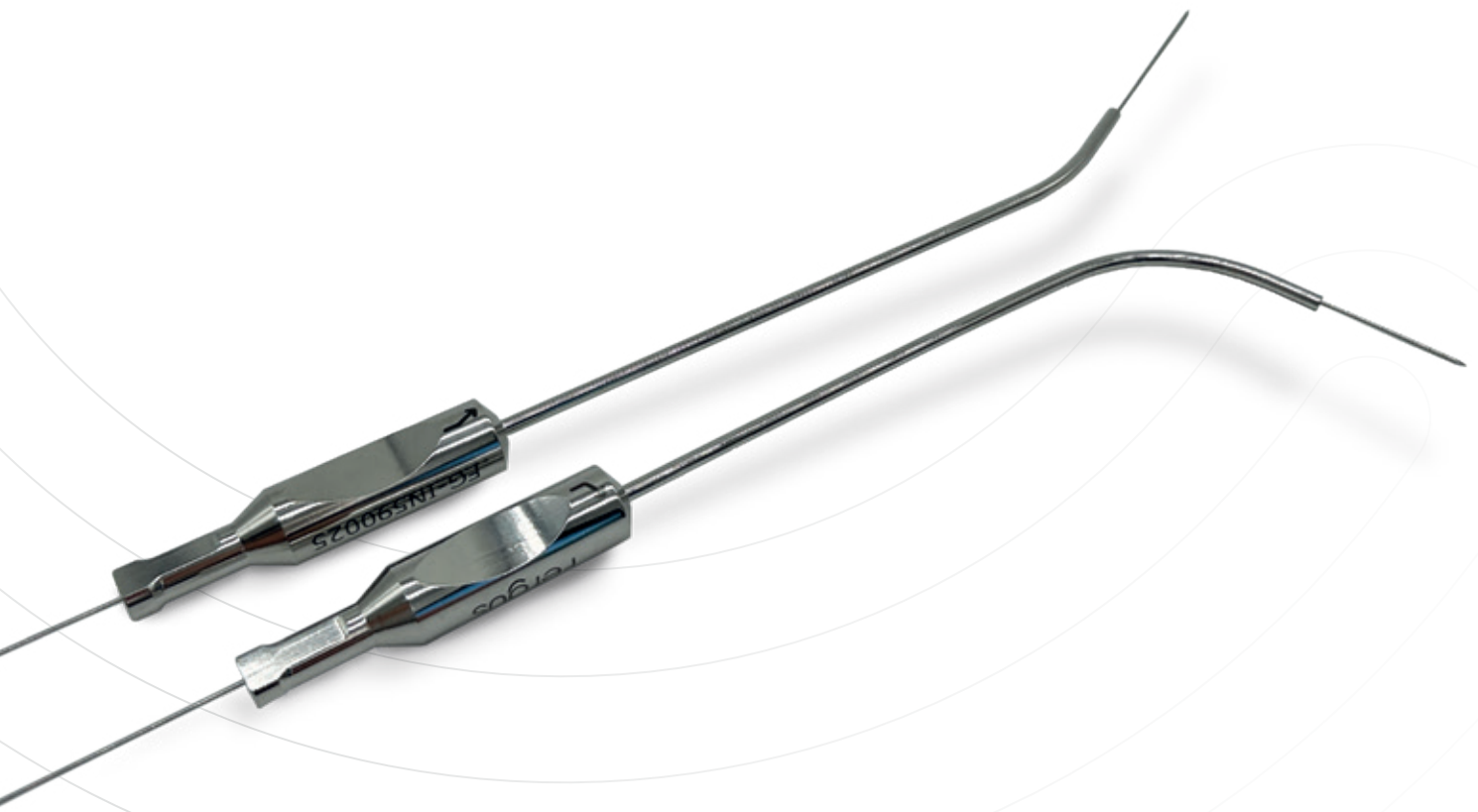

BRO-0014 / FEB-2025